

EasyCord Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

EasyCord ist ein Retraktionsfaden der Extraklasse. EasyCord ist ein aus 100 % Baumwolle gestrickter Faden, ungetränkt, der mit seinem speziellen Strickmuster herausragende Produkteigenschaften bietet und das Fadenlegen stark vereinfacht. Das spezielle Design von EasyCord ermöglicht eine starke Saugfähigkeit, so dass erheblich größere Mengen eines blutstillenden Mittels aufgenommen werden können, als es bei herkömmlichen Fäden der Fall ist. Durch die gute Kompression von EasyCord lässt sich der Faden leicht legen und die eingesetzte Tränklösung kommt zu ihrer vollen Entfaltung. Das elastische Verhalten von EasyCord führt zu einem gleichmäßigen, permanenten Druck, der das Gewebe verdrängt und für einen perfekten Sitz im Sulcus sorgt. EasyCord franst nicht aus und verrutscht nicht. Auch eine Präparation bei gelegtem Faden kann ohne Probleme durchgeführt werden. EasyCord verwickelt sich nicht in rotierende Diamantbohrer.



Der im Deckel integrierte Cutter aus rostfreiem Stahl sowie die Längenmaß-Skala auf der Flasche bieten ein weiteres Plus in der Anwenderfreundlichkeit. Einfach die gewünschte Fadenlänge abmessen und Deckel schließen. EasyCord wird automatisch durch den Cutter abgeschnitten, gleichzeitig wird die Flasche verschlossen und ein Zurückgleiten des Fadens in die Flasche verhindert. EasyCord ist sofort wieder einsatzbereit. EasyCord gibt es in sechs verschiedenen farbcodierten Größen, die im Sulcus schnell und leicht identifizierbar sind.

Anwendung:

- 1.) Wahl der geeigneten Fadengröße: Da sich EasyCord leicht komprimieren lässt, ist eine Fadenstärke zu wählen, die zu dick erscheint.
- 2.) Der Faden kann, wenn gewünscht oder notwendig, mit hämostatischer Lösung getränkt werden. Auch andere Tränkmittel wie Aluminiumchlorid, Phosphatlösungen oder Epinephrin-Hydrochloridlösung können mit EasyCord verwendet werden.
- 3.) Mit einem geeigneten Fadenstopfer EasyCord in den Sulcus einbringen und die betroffenen Bereiche spülen.
- 4.) Je nach Beschaffenheit der Gingiva wird die optimale Verdrängung zwischen zwei bis fünf Minuten erzielt und der Faden kann entfernt werden. Um eine eventuelle permanente Verdrängung des Zahnfleisches zu vermeiden, sollte der Faden nicht länger als 20 Min. im Sulcus verbleiben!
- 5.) Präparation leicht mit Luft-/Wasserspray reinigen, anschließend trocknen und abformen.

Indikation nach Größen

Größe: 000 / grün

Im Frontzahnbereich als unterer Faden bei der Doppelfadentechnik

Bei sehr empfindlicher und dünner Gingiva

Größe: 00 / braun

Unterer Faden bei der Doppelfadentechnik
Präparation und Befestigung von Veneers

Größe: 0 / lila

Unterer Faden bei der Doppelfadentechnik

UK-Frontzahngebiet

Restauration der Klassen III, IV und V



Größe: 1 / blau

Frontzahn- und Prämolarenbereich / Schutz bei Vorpräparationen

Größe: 2 / orange

Oberer Faden für Doppelfadentechnik

Prämolaren- und Molarenbereich / Schutz bei Vorpräparationen

Größe: 3 / gelb

Oberer Faden für Doppelfadentechnik / Molaren mit ausgeprägter, dicker Gingiva

Arbeits- und Sicherheitshinweise

Die oben genannten Produkte dürfen nur gemäß der vorgegebenen Gebrauchsanweisung angewendet werden. Jede andere Verwendung, die nicht mit dieser Gebrauchsanweisung übereinstimmt, unterliegt der alleinigen Haftung des Verwenders.

Produktsortiment:

EasyCord ist erhältlich in 6 Größen, von Extra-Fein (Größe 000) bis Extra-Stark (Größe 3)

000 grün, 254 cm (REF 20254-000)

00 braun, 254 cm (REF 20254-00)

0 lila, 254 cm (REF 20254-0)

1 blau 254 cm (REF 20254-1)

2 orange, 254 cm (REF 20254-2)

3 gelb, 254 cm (REF 20254-3)

CE

Müller-Omicron GmbH & Co. KG

Customer Care Center

Schlösserstr. 1

D-51789 Lindlar / Germany

Tel.: 00 49 2266 47420

Fax: 00 49 2266 3417

E-mail: info@mueller-omicron.de

www.mueller-omicron.de

Irrtümer und Änderungen vorbehalten